

Bettnässen

Seit 1999

Die nächtliche Enuresis

AntiNass elektronischer Weckapparat kabellos für enuretische Kinder



Bettnässen! Dieses Problem ist weitaus häufiger als gemeinhin angenommen. Trotzdem bleibt es ein **Tabuthema**. Nicht nur das von der nächtlichen Enuresis betroffene Kind leidet sehr darunter, sondern auch die ganze Familie, die auf diese Weise unter Druck gesetzt wird. Fast 10 % der 6jährigen Kinder und ungefähr 6 % der 10jährigen nässen ihr Bett während dem Schlafen. Verschiedene Studien ergeben, dass bei 70 bis 85 % der Bettnäasser über 5 Jahre die Ursache genetischer Art ist. Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen. Diese Zahlen zeigen, dass **Sie von diesem Problem nicht allein betroffen sind**. Es gibt keinen Grund zum Dramatisieren. **Ihr Kind kann von dieser Krankheit auch geheilt werden und wieder Selbstvertrauen gewinnen.**

Die meisten Kinder hören zwischen 5 und 6 Jahren auf, ihr Bett nass zu machen. Manchmal braucht es ein bisschen mehr Zeit. Es kommt auf die Reife des Kindes und seine körperliche Entwicklung an.

Ist das Bettnässen für Ihr Kind hindernd geworden? Kann es an gewissen Aktivitäten nicht mehr wie andere Kinder teilnehmen (bei einem Freund oder einer Freundin übernachten, mit der Schule in ein Lager gehen, usw.)? Wenn ja, **dann ist es Zeit, sich ernsthaft mit dem Problem zu befassen!** Zusammen wollen wir alles unternehmen, um dieses Übel zu beseitigen.

Unsere Methode basiert auf der **Pavlovschen Reflextheorie** (suggestive Verhaltenstherapie der *enuresis nocturna*). **AntiNass** ist eine Heilmethode **ohne Medikamente** in Form eines **elektronischen Weckapparats**. Die meisten Kinder, die nachts nicht trocken sind, haben einen sehr tiefen Schlaf und können aus diesem Grund das unabsichtliche nächtliche Einnässen nicht wahrnehmen. Durch den Alarm, der stets im richtigen Moment ausgelöst wird (bei den ersten Urintropfen), lernt das Kind zu reagieren und **entwickelt in seinem Unterbewusstsein, den Reflex seinen Urin zurückzuhalten**. Wenn seine Blase voll ist, wird es aufwachen und auf die Toilette gehen.

AntiNass ist sehr **einfach zu handhaben**

Eine leitende Polyesterfolie (Nässefühler) wird im Slip platziert. Der Slip kann alleine oder unter dem Pyjama getragen werden. Bei den ersten Urintropfen wird ein Signal zum Apparat (Empfänger) übertragen: Der Alarm wird ausgelöst (Ton + Blinklicht).



Für eine erfolgreiche Behandlung

- Das Kind muss motiviert sein und an der Behandlung aktiv teilnehmen
- Während des Alarms muss das Kind **ganz wach** werden (bewusst sein). Eine erwachsene Person muss das Kind aufnehmen, mit ihm sprechen, so dass es sich am nächsten Morgen daran erinnern kann
- Das Kind soll **nur einmal in der Nacht geweckt** werden, um unnötigen Stress zu verhindern
- Bevor Sie die Behandlung beginnen, ist es besser, einen Arztbesuch zu machen, um organische Ursachen des Bettnässens auszuschliessen.

Die Vorteile mit AntiNass

- ✓ Das **wirksamste** Mittel zur Enuresis-Behandlung (mehr als 85 % Erfolg)
- ✓ Das Mittel, das **am wenigsten Rückfälle** aufweist
- ✓ **Keine chemischen Substanzen, also keine Nebenwirkungen**
- ✓ **Kabellos**: Das Kind kann sich frei bewegen. Keine Verwicklungsgefahr!
- ✓ **Gefahrlos**: Die gesendeten Wellen sind sehr schwach und werden nur während des Alarms gesendet
- ✓ **Kein Zurückhalten mit dem Getränk**, auch abends nicht
- ✓ **Relativ kurze Behandlungsdauer**: Durchschnittlich zwischen 10 bis 12 Wochen
- ✓ **Sehr lange Erfahrung**: seit über **75 Jahren** behandeln wir die Bettnässer mit Erfolg. Hunderte von Zeugnissen und Dankschreiben bestätigen stets die Wirksamkeit unserer Methode
- ✓ **Die Kur wird betreut**: Beratung und Auskunft über die Behandlung im Mietpreis inbegriffen.
- ✓ Das **AntiNass** System ist **MEPV konform** (Medizin Produkte Verordnung).

Um vom **Beitrag Ihrer Krankenkasse** zu profitieren, muss der Patient **5jährig sein**. Vergessen Sie nicht, bei Ihrem Arzt ein Rezept zu verlangen.

Unser AntiNass Weckapparat ist in Miete.

Um ihn zu bestellen oder für weitere Auskunft, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere Webseite www.antinass.ch.



Melebi SA

**Château 59
2520 La Neuveville**

Tel. 032 751 27 95 / FAX 032 751 27 82

E-Mail: info@melebi.ch / www.antinass.ch