

“Pipi au lit”

L'énurésie nocturne

Depuis 1952

Pipi-Stop réveil électronique sans fil pour enfants énurétiques

Mouiller le lit! Ce problème est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. Pourtant, le sujet reste **tabou**. Non seulement l'enfant touché par l'énurésie nocturne souffre beaucoup, mais encore toute sa famille qui est ainsi mise sous pression. Près de 10 % des enfants de 6 ans et environ 6 % des enfants de 10 ans mouillent leur lit durant leur sommeil. Selon différentes études, l'énurésie est héréditaire chez 70 à 85 % des enfants énurétiques de plus de 5 ans, et les garçons sont davantage touchés que les filles.

Ces quelques chiffres vous démontrent que **vous n'êtes pas les seuls à être concernés par ce problème**. Il n'y a pas lieu de dramatiser. **Votre enfant peut, lui aussi, guérir de cette maladie et reprendre confiance en lui.**




En général, les enfants arrêtent de mouiller leur lit avant l'âge de 5 ou 6 ans. Parfois, il faut un peu plus de temps. Cela dépend de la maturité de l'enfant et de son développement physique.

L'énurésie est-elle devenue handicapante pour votre enfant? Ne peut-il plus prendre part à certaines activités comme les autres enfants (aller dormir chez un copain ou une copine, partir en camp avec l'école, etc.)? Si oui, **c'est le moment de prendre sérieusement le problème en main!** Ensemble, nous allons tout entreprendre afin d'éliminer cet inconvénient.

Notre méthode est basée sur le **conditionnement du réflexe** de Pavlov (thérapie comportementale de l'*enuresis nocturna*). **Pipi-Stop** est une méthode de guérison **sans médicaments**, qui se présente sous forme d'un **réveil électronique**. La plupart des enfants énurétiques dorment très profondément et de ce fait, n'arrivent pas à prendre conscience de leur miction nocturne involontaire. Par l'alarme, qui sera toujours activée au bon moment (dès les premières gouttes d'urine), l'enfant pourra apprendre à réagir et à **développer dans son subconscient le réflexe conditionné de retenir son « pipi »**. Si sa vessie est bien remplie, il se réveillera et pourra se rendre aux toilettes.

Pipi-Stop est très **simple à utiliser**

Une feuille plastique conductrice (détecteur d'urine) se glisse dans le slip, porté seul ou sous le pyjama. Dès les premières gouttes d'urine, un signal est émis et envoyé à l'appareil (récepteur) : l'alarme est activée (sonnerie + lumière clignotante).

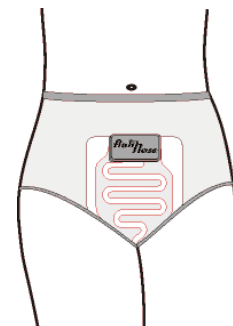

Pour réussir le traitement

- L'enfant doit être motivé et participer à la thérapie
- L'enfant doit être **réveillé complètement** (être conscient) au moment de l'alarme. Il faut donc qu'un adulte le lève, lui parle, de sorte que le lendemain matin, il s'en souvienne
- L'enfant ne doit **être réveillé qu'une seule fois par nuit** pour éviter un stress inutile
- Avant de commencer le traitement, il est conseillé de consulter un médecin afin d'exclure toute cause organique de l'énurésie.

Les avantages avec Papi-Stop

- ✓ Le moyen **le plus efficace** pour le traitement de l'énurésie (plus de 85 % de réussites)
- ✓ Le moyen qui **compte le moins de rechutes**
- ✓ **Pas de substances chimiques**, donc **pas d'effets secondaires**
- ✓ **Sans fil**: l'enfant garde toute sa liberté de mouvement. Pas de risques de s'emmêler!
- ✓ **Sans danger**: les ondes émises sont très faibles et ne sont transmises que pendant l'alarme
- ✓ **Aucune restriction de boisson**, même le soir
- ✓ **Traitement relativement court**: en moyenne entre 10 et 12 semaines
- ✓ **Très longue expérience**: depuis plus de **75 ans** nous traitons avec succès des enfants énurétiques. Des centaines de témoignages et lettres de reconnaissance confirment continuellement l'efficacité de notre méthode
- ✓ **Suivi de la cure**: consultations et renseignements concernant le traitement compris dans la location
- ✓ **Papi-Stop** est **conforme aux prescriptions Odim** (Ordonnance sur les dispositifs médicaux).

Pour bénéficier de la **prise en charge par votre caisse-maladie**, l'enfant traité doit avoir **5 ans révolus**. N'oubliez pas de demander une ordonnance médicale à votre médecin traitant.

Notre réveil électronique Papi-Stop est en location.

Pour le commander ou pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter ou visiter notre site Internet www.pipi-stop.ch.



Melebi SA

**Château 59
2520 La Neuveville**

tél. 032 751 27 95 / fax 032 751 27 82

e-mail: info@melebi.ch / www.pipi-stop.ch