

Technologische Neuheit

Vibrierendes Armband VIBRA kabellos...

...als Ergänzungshilfsmittel zum Pipi-Stop® Weckapparat (Basiseinheit)

Wir bieten Ihnen unsere neuste Entwicklung an:

Das vibrierende Armband für den Gebrauch mit oder ohne akustischen Alarm.



Das vibrierende Armband VIBRA wird am Handgelenk oder am Arm getragen


Die meisten bettnässenden Kinder schlafen sehr tief und merken nicht, dass sie während des Schlafs wasserlassen. Aus diesem Grund ist es **vorteilhaft die Behandlung mit unserem Pipi-Stop® Weckapparat, der einen akustischen Alarm hat, zu beginnen**. Dies ist die **beste Weise, die Eltern vom Moment des Einnässens ihres Kindes zu informieren**, so dass sie es wecken können, und das Kind den Reflex, seinen Urin im richtigen Moment zurückzuhalten, entwickeln kann.

Wenn das Kind beim Einnässen leichter erwacht, ist es möglich, auf den akustischen Alarm zu verzichten und mit dem vibrierenden Armband weiterzufahren. So kann man vermeiden, die anderen Familien-Mitglieder zu wecken.

Das **vibrierende Armband** wird als **Ergänzungshilfsmittel zum Pipi-Stop® Weckapparat (Basiseinheit)** eingesetzt.

1. Phase der Behandlung:

Zu Beginn der Behandlung ist es notwendig das Pipi-Stop® Weckapparat (Basiseinheit) mit akustischem Alarm zu benutzen.

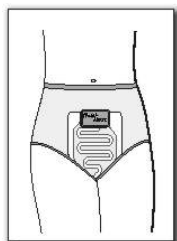

Der Sensor (leitende Plastikfolie) wird im Slip getragen. So verrutscht der Sensor nicht. Bei den ersten Tropfen Urin wird mittels des Senders ein Signal zum Empfänger übertragen: Der Alarm wird ausgelöst (Ton + Blinklicht).



2. Phase der Behandlung:

Sobald das Kind durch den akustischen Alarm selber erwacht, ist es möglich nur mit dem vibrierenden Armband weiterzufahren (das Armband VIBRA kann **mit oder ohne den akustischen Alarm** des Empfängers benutzt werden).

August 2014