

Traitement de l'énurésie (pipi au lit)

1932 – 2017

85 ans du Pipi-Stop®

Nouveauté technologique

Bracelet vibreur VIBRA sans fil...

...en complément au Pipi-Stop® (appareil de base)

Nous vous proposons notre dernier développement :

Le bracelet vibreur pour une utilisation avec ou sans alarme acoustique.



Swiss made

Le bracelet vibreur VIBRA se porte au poignet ou au bras

Généralement, les enfants énurétiques dorment très profondément et ne sentent pas le besoin de faire pipi pendant leur sommeil. Pour cette raison, il est **judicieux de commencer le traitement avec notre Pipi-Stop qui a une alarme acoustique**. Ceci est la **meilleure manière d'aviser les parents** du moment de la miction nocturne pour qu'ils puissent aller réveiller leur enfant. Ainsi l'enfant pourra développer le réflexe de retenir son urine au bon moment.

Lorsque l'enfant se réveille plus facilement pendant la nuit, il est possible de se passer de l'alarme acoustique et de poursuivre avec le bracelet vibreur, ce qui évitera de réveiller d'autres membres de la famille.


Le **bracelet vibreur** intervient **en complément du Pipi-Stop (appareil de base)**.

1^{ère} phase du traitement:

Au début du traitement, il est indispensable d'utiliser le Pipi-Stop (appareil de base) avec l'alarme acoustique.



Le détecteur d'urine (feuille plastique conductrice) se porte dans un slip. Ainsi le détecteur reste bien en place. Dès les premières gouttes d'urine, l'émetteur envoie un signal au récepteur: l'alarme est activée (sonnerie + lumière clignotante).

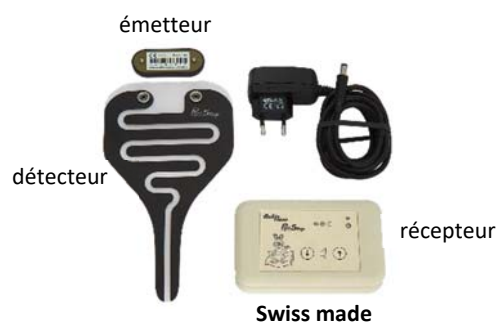

Pipi-Stop® (appareil de base)

2^e phase du traitement:

Dès que l'enfant se réveille de lui-même par l'alarme acoustique, il est possible de passer en mode vibreur seul (le bracelet VIBRA peut être utilisé **avec** ou **sans** l'alarme acoustique du récepteur).



Melebi SA, Chemin du Parc 12, 2502 Biel/Bienne

tél. 032 - 751 27 95 / fax 032 - 751 27 82

e-mail: info@melebi.ch / www.pipi-stop.ch

Flyer_Vibra_07-2017_FR_N