

Gebrauchsanweisung (1)

Elektronischer Weckapparat, kabellos,
für Kinder, die ihr Bett nässen (nächtliche Enuresis)

Pipi-Stop®

AntiNass®



► INBETRIEBNAHME DES SYSTEMS

Vorbereitung des Senders und der Urin-Folie



1. Bestandteile des Pipi-Stop vorbereiten



2. Urin-Folie auspacken



3. Sender auspacken



4. Sender auf der Urin-Folie fixieren.
Die Polarität spielt keine Rolle.



5. Papier oder Serviette vorbereiten




6. Urin-Folie diagonal in der Mitte auf dem Papier
platzieren (Sender oben / Pipi-Stop muss lesbar sein)



7. Papier über die Urin-Folie falten



8. Wenn nötig Papier
fixieren, um einen direkten
Kontakt der Urin-Folie mit
der Haut zu vermeiden

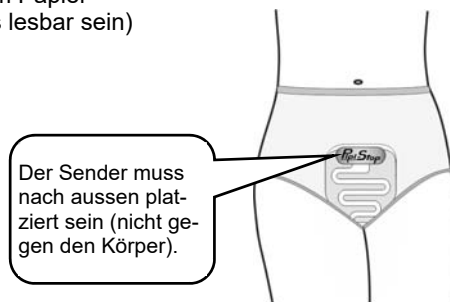

Der Sender muss
nach aussen platziert
sein (nicht gegen
den Körper).



9. Urin-Folie im Slip platzieren, auf dem Bauch des Kindes,
mit der Zunge zwischen den Beinen.
Die Urin-Folie darf nicht gefalzt werden, aber es ist normal, dass sie die Körperform annimmt.

Idealerweise platzieren Sie die Urin-Folie und den Sender zwischen 2 Unterhosen. Somit werden eventuelle Fehlalarme durch Schweiß vermieden und die Elemente werden besser fixiert.

Vorbereitung des Empfängers



10. Empfänger auf den Nachttisch stellen (ausser Reichweite des Kindes)



11. Den runden Stecker des
Netzadapters in die Kupplung hinten
am Empfänger einstecken



12. Netzadapter an einer Steckdose 230V
anschiessen → blaue Kontroll-Lampe
leuchtet auf + akustisches Signal