

Gebrauchsanweisung (2)

Elektronischer Weckapparat, kabellos,
für Kinder, die ihr Bett nässen (nächtliche Enuresis)

Pipi-Stop®



► NACH DEM NÄCHTLICHEN EINNÄSSEN



Papier entfernen und im Kehricht entsorgen (Papier jeden Tag wechseln, um Fehlalarm zu vermeiden)



Sender und Urin-Folie trennen. Dies stellt den Alarm ab!

Wenn der Alarm mehr als 3 Minuten gedauert hat, kurz eine der beiden Lautstärke-Tasten am Empfänger drücken, um den Alarm auszuschalten



Urin-Folie und Sender unter fließendem, lauwarmem Wasser reinigen



Urin-Folie und Sender trocken tupfen.
Die Urin-Folie nicht abreiben!



Resultat der Nacht im Diagramm eintragen / Apparat für den restlichen Teil der Nacht nicht mehr einsetzen.

► TEST DES SYSTEMS Ein Test mit Wasser löst keinen Alarm aus!



Test des Empfängers



Runden Stecker des Netzadapters hinten am Empfänger einstecken

Netzadapter an einer Steckdose 230V anschliessen
Kurz auf eine der beiden Lautstärkeketasten drücken

✓ **blaues Licht leuchtet + Ton**

Test des Senders



Beide Druckknöpfe des Senders mit 1 metallenen Kaffeelöffel überbrücken

✓ **Ton + weisses blinkendes Licht**

Test des kompletten Systems



Sender hinten

Sender auf der Urin-Folie fixieren und die Zunge mit 1 Kaffeelöffel überbrücken (Urin-Folie muss ausgepackt sein)


✓ **Ton + weisses blinkendes Licht**

Wenn kein Alarm: Kontrollieren, ob Empfänger und Sender nicht zu weit voneinander entfernt sind.

► EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE (wenn nötig) **Nicht beide Tasten gleichzeitig drücken!**

Lautstärke reduzieren:

Linke Taste gedrückt halten (↓) bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

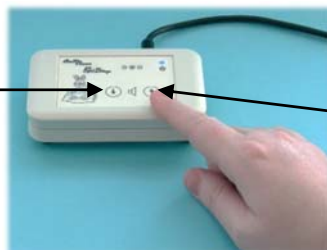

Lautstärke erhöhen:

Rechte Taste gedrückt halten (↑) bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Die Lautstärke wird automatisch gespeichert (auch bei Stromausfall).

Wenn das Pipi-Stop System nach diesen Kontrollen nicht funktioniert, rufen Sie uns bitte sofort an.

► SICHERHEIT / UNTERHALT



Achtung !

- Empfänger und Netzadapter dürfen **nie mit Wasser in Kontakt kommen** (Stromschlag Gefahr!)
- Der **Sender darf nie geöffnet werden**. Die Batterie wird nur durch Melebi SA ausgewechselt (Gewährleistung der Abdichtung!)
- **Nur unseren Netzadapter 12V mit unserem Empfänger benutzen, um eine Überspannung zu vermeiden!**
- Eventuelle Reparaturen werden **ausschliesslich** von Melebi SA ausgeführt.

Bitte am Ende der Behandlung per Post in der Original Schachtel an uns zurücksenden:

- Das **ausgefüllte Diagramm**
- **Alle gemieteten Teile** (siehe Bild im Schachtel-Deckel)