

Mode d'emploi (1)

Appareil avertisseur électronique, sans fil,
pour les enfants qui font pipi au lit (énurésie nocturne)

Pipi-Stop® AntiNass®



► MISE EN SERVICE DU SYSTEME

Préparation de l'émetteur et du détecteur d'urine (feuille plastique)



1. Préparer les éléments du Pipi-Stop



2. Déballer le détecteur d'urine



3. Déballer l'émetteur



4. Fixer l'émetteur sur le détecteur d'urine.
Le sens de la polarité ne joue aucun rôle



5. Préparer le papier ou la serviette




6. Placer le détecteur d'urine sur le papier au centre
en diagonale (émetteur dessus / Pipi-Stop est lisible)



7. Replier le papier sur le détecteur



8. Fixer le papier si
nécessaire pour éviter
un contact direct du
détecteur avec la peau

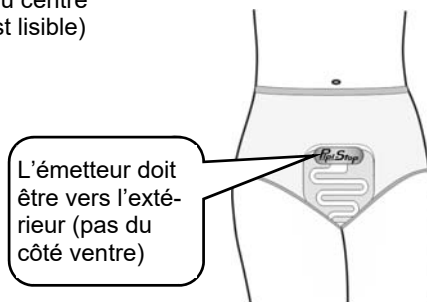

9. Placer le détecteur d'urine dans le slip, sur le ventre de l'enfant, la languette
entre les jambes.

Le détecteur d'urine ne doit pas être plié en deux, mais il est normal qu'il prenne la forme du corps.



Idéalement, vous placez le détecteur et l'émetteur entre 2 slips. Ceci évitera d'éventuelles fausses alarmes dues à la transpiration et permettra de mieux fixer les éléments.

Préparation du récepteur



10. Placer le récepteur sur la
table de nuit (hors de portée
de l'enfant)



11. Introduire la fiche ronde de l'alimen-
tation dans la prise à l'arrière du
récepteur



12. Brancher l'alimentation à une
prise 230 Volts → la lampe témoin
bleue s'allume + signal sonore