

Istruzioni per l'uso (1)

Pipi-Stop® AntiNass®



Apparecchio segnalatore elettronico senza fili
per bambini che fanno la pipì a letto (affetti da enuresi)

► ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

Preparazione del trasmettitore e del rilevatore d'urina (foglio di plastica)



1. Preparare gli elementi del Pipi-Stop



2. Togliere dall'imballaggio il rilevatore d'urina



3. Aprire la confezione del trasmettitore



4. Fissare il trasmettitore sul rilevatore d'urina.
L'orientamento della polarità è indifferente



5. Preparare la carta o il tovagliolo



6. Posizionare il rilevatore d'urina sulla carta in diagonale
(con il trasmettitore sopra / Pipi-Stop dev'essere leggibile)



7. Piegare la carta sul rilevatore d'urina



8. Fissare la carta, se necessario, per evitare il contatto diretto del rilevatore d'urina con la pelle



9. Piazzare il rilevatore d'urina negli slip, sulla pancia, con la linguetta tra le gambe.

Il rilevatore d'urina non deve essere piegato in due, ma è normale che prenda la forma del corpo.



Idealmente, ponere il rilevatore e il trasmettitore tra 2 slip. Ciò eviterà eventuali falsi allarmi dovuti alla sudorazione e permetterà di fissare meglio gli elementi.

Preparazione del ricevitore



10. Mettere il ricevitore sul comodino (fuori dalla portata del bambino)



11. Introdurre lo spinotto rotondo del trasformatore di rete nella presa sul retro del ricevitore



12. Collegare il trasformatore ad una presa da 230V → la spia blu si accende e si sente segnale acustico