

Trattamento dell'enuresi (pipì a letto)

Braccialetto vibrante VIBRA senza fili

Vi proponiamo nostro braccialetto vibrante in aggiunta al Pipì-Stop® (apparecchio di base) per l'utilizzo con o senza allarme acustico.



Generalmente i bambini enuretici dormono molto profondamente e non percepiscono il bisogno di fare pipì durante il sonno. Per questa ragione è **bene iniziare il trattamento con il Pipì-Stop, che è dotato di un allarme acustico**. Questo è il **modo migliore di avvisare i genitori** al momento della minzione notturna del figlio, affinché possano andare a svegliarlo e affinché il bambino possa sviluppare il riflesso di trattenere l'urina al momento giusto.

Se il bambino si sveglia più facilmente al momento della minzione, è possibile fare a meno dell'allarme acustico e proseguire il trattamento con il braccialetto vibrante. Ciò eviterà di svegliare gli altri membri della famiglia.

Il braccialetto vibrante viene utilizzato in aggiunta al Pipì-Stop (apparecchio di base).



Prima fase del trattamento:

All'inizio del trattamento, è essenziale utilizzare il Pipì-Stop (apparecchio di base) con allarme acustico.

Il rivelatore d'urina (foglio di plastica conduttore) viene posto negli slip, in modo da restare bene in posizione. Al momento della fuoriuscita delle prime gocce d'urina, il trasmettitore invia un segnale al ricevitore e l'allarme viene attivato (suoneria + luce lampeggiante).



Seconda fase del trattamento:

Quando anche il bambino viene svegliato più facilmente dall'allarme acustico, è possibile passare alla sola modalità vibrazione (il braccialetto VIBRA può essere utilizzato **con o senza l'allarme acustico del ricevitore**).