


Réglage du volume

Augmenter le volume : presser la touche  en restant dessus jusqu'au volume désiré

Baisser le volume : presser la touche  en restant dessus jusqu'au volume désiré

Pour activer le **mode silencieux**, presser les deux boutons du volume en même temps.

Pour désactiver, presser simplement un des deux boutons.

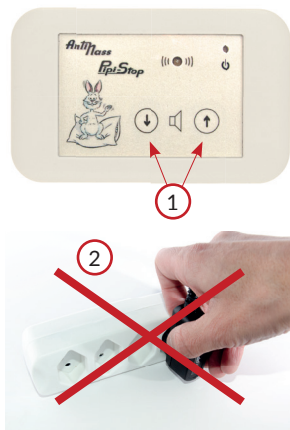

Après la miction nocturne

Pour arrêter l'alarme :

1. Séparer l'émetteur du détecteur d'urine

Si l'alarme a duré plus de 3 minutes, presser brièvement l'un des 2 boutons de réglage du son sur le récepteur pour arrêter l'alarme

2. Ne pas débrancher le câble d'alimentation
pour arrêter l'alarme

Nettoyage du détecteur d'urine et de l'émetteur :

1. Séparer l'émetteur du détecteur d'urine
2. Laver le détecteur d'urine et l'émetteur à l'eau courante tiède
3. Sécher délicatement le détecteur et l'émetteur **NE PAS FROTTER LE DÉTECTEUR !**



Melebi SA

Parkweg 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 751 27 95
fax 032 751 27 82

email: info@melebi.ch
www.pipi-stop.ch



CE Notre appareil remplit les directives RoHS

Version mars 2021

Mode d'emploi du Pipi-Stop

Éléments de l'appareil avertisseur Pipi-Stop®



Détecteur d'urine



Récepteur



Émetteur




Alimentation

TESTER LE SYSTÈME

Voir les vidéos des tests: www.pipi-stop.ch/fr/therapie-pipi-stop/mode-d-emploi/

Test du récepteur :

1. Brancher l'alimentation à une prise (230V) et la relier à l'arrière du récepteur
2. Presser brièvement **sur l'un des 2 boutons** de réglage du volume
3. **Résultat du test point 1 et 2 :**
lumière bleue allumée + son

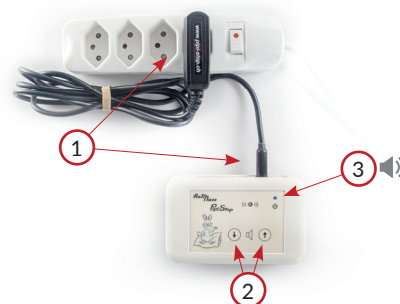

Test de l'émetteur :

1. Ponter (relier) les 2 boutons pressions avec une petite cuillère en métal
2. **Résultat du test :**
Lumière blanche clignotante + son





Test du système complet:

①

1. Fixer l'émetteur sur le détecteur (le détecteur doit être déballé)
2. Ponter la languette avec une cuillère
3. **Résultat du test:** lumière blanche clignotante + son



Préparation de l'émetteur et du détecteur d'urine

Fixer l'émetteur sur le détecteur d'urine
(le sens de la polarité ne joue aucun rôle)



①



②



⚠ ③



④



Idéalement, placer le détecteur et l'émetteur entre 2 slips. Ceci évitera d'éventuelles fausses alarmes dues à la transpiration et permettra de mieux fixer les éléments.

Placer le détecteur d'urine avec l'émetteur sur le ventre de l'enfant (émetteur vers l'extérieur), la languette entre les jambes. Le détecteur d'urine ne doit pas être plié en deux, mais il est normal qu'il prenne la forme du corps.

Important!

Un test avec de l'eau ne déclenche pas d'alarme!

S'il n'y a pas d'alarme: vérifier que le récepteur et l'émetteur se trouvent à proximité.

Si le Pipi-Stop ne fonctionne pas après avoir effectué ces contrôles, **veuillez nous contacter immédiatement.**

Sécurité / Maintenance

Le récepteur et l'alimentation ne doivent **JAMAIS** être mis en contact avec de l'eau (danger d'électrocution!)

L'émetteur ne doit **JAMAIS** être ouvert. La pile ne sera changée que par Melebi SA pour des raisons d'étanchéité.

Utiliser **UNIQUEMENT** notre alimentation 12V avec notre récepteur pour éviter une surtension!

D'éventuelles réparations sont **exclusivement** effectuées par Melebi SA.

Préparation du récepteur

Relier l'alimentation au récepteur et la brancher à une prise 230 Volts (la lampe témoin bleue s'allume + signal sonore)

Placer le récepteur sur la table de nuit de l'enfant

