

Gebrauchsanweisung für den Pippi-Stop

Elemente des Pippi-Stop® Weckapparats



Urin-Folie



Flanell-Hülle



Empfänger




Sender



Netzadapter

DAS SYSTEM TESTEN

Sehen Sie die Videos unter: www.pippi-stop.ch/pippi-stop-therapie/gebrauchsanweisung/

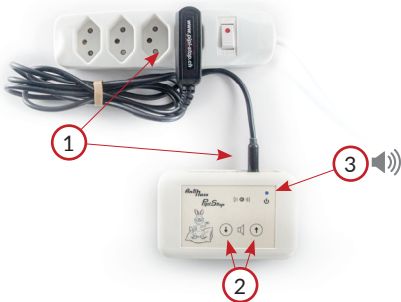


Test des Empfängers:

1. Netzadapter an eine Steckdose (230V) anschliessen und hinten am Empfänger einstecken
2. Kurz auf **eine der 2 Lautstärketasten drücken**
3. **Testergebnis Punkt 1 und 2** : blaues Licht + Ton

Test des Senders:

1. Überbrückung (Verbindung) der 2 Druckknöpfe mit einem kleinen Metallöffel
2. **Testergebnis** :
weisses blinkendes Licht + Ton



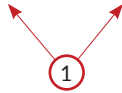

Test des ganzen Systems:

1. Den Sender an der Urin-Folie befestigen (*die Urin-Folie muss ausgepackt werden*)
2. Die Lasche mit einem Metallöffel überbrücken
3. **Testergebnis:** weisses blinkendes Licht + Ton



Wichtig!

Ein Test mit Wasser löst keinen Alarm aus!

Wenn der Alarm nicht auslöst: Prüfen Sie, ob sich Empfänger und Sender in unmittelbarer Nähe befinden. Sollte der Pipi-Stop trotz dieser Überprüfungen nicht funktionieren, **kontaktieren Sie uns bitte sofort.**

Sicherheit / Instandhaltung

Der Empfänger und **Netzadapter** dürfen **NIEMALS** mit Wasser in Berührung kommen (*Stromschlaggefahr!*)

Der Sender darf **NIEMALS** geöffnet werden. Die Batterie wird ausschliesslich durch Melebi SA gewechselt, um die Abdichtung zu garantieren.

NUR unseren Netzadapter 12V mit unserem Empfänger benutzen, um eine Überspannung zu vermeiden!

Alle Reparaturen werden **ausschliesslich** von Melebi SA durchgeführt.

Vorbereitung von Sender und Urin-Folie

Den Sender an der Urin-Folie befestigen
(die Ausrichtung spielt keine Rolle)



1

2

3




Die Urin-Folie in die Flanell-Hülle hineinschieben, so dass der Sender nach oben zeigt. Dann die Lasche der Hülle nach innen klappen und sicherstellen, dass alles gut fixiert ist.

4

5

6

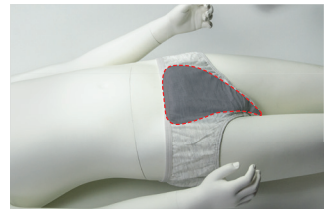

Dann die vorbereitete Hülle in einem Slip platzieren und darauf achten, dass sich der Sender auf der Aussenseite befindet (nicht gegen den Körper), mit dem schmalen Teil zwischen den Beinen.

Vorbereitung des Empfängers

Netzadapter hinten am Empfänger einstecken
und an eine 230-Volt-Steckdose anschliessen
(blaue Kontrollleuchte + Piepton)

Den Empfänger auf den Nachttisch des Kindes legen




Lautstärke regeln

Lauter machen: Taste (↑) gedrückt halten bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist

Leiser machen: Taste (↓) gedrückt halten bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist

Um den **Lautlos-Modus** zu aktivieren, beide Lautstärketasten gleichzeitig drücken.
Zum Deaktivieren einfach eine der beiden Tasten drücken.

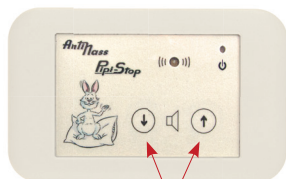

Nach dem nächtlichen Einnässen

Um den Alarm zu beenden:

1. Den Sender von der Urin-Folie trennen

Wenn der Alarm mehr als 3 Minuten gedauert hat, kurz eine der beiden Lautstärke-Tasten am Empfänger drücken, um den Alarm auszuschalten

2. Den Stecker nicht herausziehen, um den Alarm zu stoppen!

Reinigung von Urin-Folie, Sender und Flanell-Hülle:

Die einzelnen Teile trennen und sofort gründlich unter fließendem, lauwarmem Wasser auswaschen.



Sender und Urin-Folie abspülen und vorsichtig trocknen
(**URIN-FOLIE NICHT TROCKEN REIBEN!**)

Nach der Reinigung der Flanell-Hülle, diese auswringen, aufhängen und an der Luft trocknen lassen.
(*schnelltrocknend*)

Melebi SA

Parkweg 12
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 751 27 95
Fax 032 751 27 82

E-Mail: info@melebi.ch
www.pipi-stop.ch



CE Unser Apparat erfüllt die RoHS Richtlinien