

# Bettnässen

Die nächtliche Enuresis

## Pipi-Stop®

Weckapparat kabellos  
in Miete für enuretische Kinder



Swiss made

## Bettnässen!

Dieses Problem ist weitaus häufiger als gemeinhin angenommen. Trotzdem bleibt es ein **Tabuthema**. Nicht nur das von der nächtlichen Enuresis betroffene Kind leidet sehr darunter, sondern auch die ganze Familie, die auf diese Weise unter Druck gesetzt wird.

Fast 10% der 6-jährigen Kinder und ungefähr 6% der 10-jährigen nässen ihr Bett während dem Schlafen. Verschiedene Studien ergeben, dass bei 70 bis 85% der Bettnässer über 5 Jahre die Ursache genetischer Art ist. Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen.

## Ist das Bettnässen für Ihr Kind hindernd geworden?

Kann es an gewissen Aktivitäten nicht mehr wie andere Kinder teilnehmen (bei einem Freund oder einer Freundin übernachten, mit der Schule in ein Lager gehen, usw.)?

Wenn ja, **dann ist es Zeit, sich ernsthaft mit dem Problem zu befassen!** Zusammen wollen wir alles unternehmen, um diesen Missstand zu beseitigen.

Unsere Methode basiert auf der **Pavlovschen Reflextheorie** (suggestive Verhaltenstherapie der enuresis nocturna).

Diese Zahlen zeigen, dass **Sie von diesem Problem nicht allein betroffen sind**. Es gibt keinen Grund zum Dramatisieren. **Ihr Kind kann von dieser Krankheit auch geheilt werden und wieder Selbstvertrauen gewinnen.**

Die meisten Kinder hören zwischen 5 und 6 Jahren auf, ihr Bett nass zu machen. Manchmal braucht es ein bisschen mehr Zeit. Es kommt auf die Reife des Kindes und seine körperliche Entwicklung an.

**Pipi-Stop** ist eine Heilmethode **ohne Medikamente** in Form eines **elektronischen Weckapparats**.


Die meisten Kinder, die nachts nicht trocken sind, haben einen sehr tiefen Schlaf und können aus diesem Grund das unabsichtliche nächtliche Einnässen nicht wahrnehmen.

Durch den Alarm, der stets im richtigen Moment ausgelöst wird (bei den ersten Tropfen Urin), lernt das Kind zu reagieren und **entwickelt in seinem Unterbewusstsein, den Reflex seinen Urin zurückzuhalten**. Wenn seine Blase voll ist, wird es aufwachen und auf die Toilette gehen.

## Pipi-Stop ist sehr einfach zu handhaben

Ein Sensor (leitende Polyesterfolie) wird im Slip getragen. So verrutscht dieser nicht.

Bei den ersten Tropfen Urin wird mittels des Senders ein Signal zum Empfänger übertragen: Der Alarm wird ausgelöst (Ton + Blinklicht).

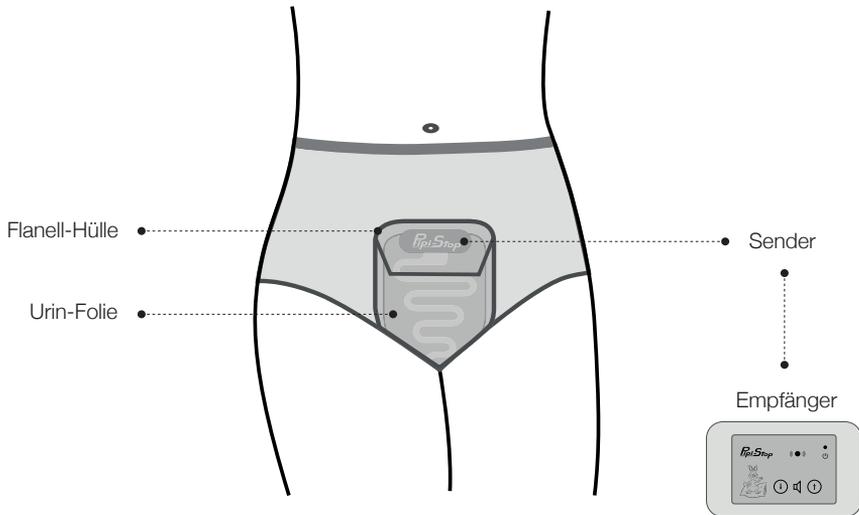

## Für eine erfolgreiche Behandlung

- Das Kind muss motiviert sein und an der Behandlung aktiv teilnehmen
- Während des Alarms muss das Kind **ganz wach** werden (bewusst sein). Eine erwachsene Person muss das Kind aufnehmen, mit ihm sprechen, so dass es sich am nächsten Morgen daran erinnern kann
- Das Kind soll **nur einmal in der Nacht geweckt** werden (der Lern-effekt bleibt gleich)
- Bevor Sie die Behandlung beginnen, ist es besser, einen Arztbesuch zu machen, um organische Ursachen des Bettnässens auszuschliessen.

## Die Vorteile mit Pipi-Stop

- ✓ Das **wirksamste** Mittel zur Enuresis-Behandlung (~90% Erfolg)
- ✓ Das Mittel, das **am wenigsten Rückfälle** aufweist
- ✓ **Keine chemischen Substanzen, also keine Nebenwirkungen**
- ✓ **Kabellos**: Das Kind kann sich frei bewegen. Keine Verwicklungsgefahr!
- ✓ **Gefahrlos**: Die gesendeten Wellen sind sehr schwach (mehr als 100'000-mal schwächer als diejenigen eines Handy) und werden nur während des Alarms gesendet
- ✓ **Kein Zurückhalten mit den Getränken**, auch abends nicht
- ✓ **Relativ kurze Behandlungsdauer**: Durchschnittlich zwischen 6 bis 12 Wochen
- ✓ **Sehr lange Erfahrung**: seit über **85 Jahren** behandeln wir die Bettnässer mit Erfolg. Hunderte von Zeugnissen und Dankschreiben bestätigen stets die Wirksamkeit unserer Methode
- ✓ **Die Kur wird betreut**: Beratung und Auskunft über die Behandlung im Mietpreis inbegriffen
- ✓ Der **Pipi-Stop** erfüllt die RoHS Richtlinien (**CE-Konformität**).

Um vom **Beitrag Ihrer Krankenkasse** zu profitieren, muss der Patient **5-jährig sein**. Vergessen Sie nicht, bei Ihrem Arzt ein Rezept zu verlangen.

**Unser Pipi-Stop Weckapparat ist in Miete.**

Um ihn zu bestellen oder für weitere Auskunft, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere Webseite [www.pipi-stop.ch](http://www.pipi-stop.ch)

---

### Melebi SA

Parkweg 12  
2502 Biel/Bienne  
tel. 032 751 27 95  
fax 032 751 27 82

mail: [info@melebi.ch](mailto:info@melebi.ch)  
[www.pipi-stop.ch](http://www.pipi-stop.ch)



Swiss made



Unser Apparat erfüllt die RoHS Richtlinien

Version September 2024